

ワンタッチ式 ベルトタンカ

風呂入浴用

ベルカ

日本製

商品番号

DHB-150

災害発生時には、緊急担架として、入浴用として、ご利用下さい。

特徴

1. 500番原糸で撥水加工、メッシュ織で当社独自の担架布を織り上げた仕様布のため、水抜けよく連続使用できます。
2. 寝具から浴槽までそのまま移動できます。
3. 緊急時には救護担架として利用頂けます。


使用手順

1. 寝具の上で、体を斜めにして担架を差し込み(衣類を取り換えるように)搬送者をお尻位置を担架の赤▲マーク位置に寝かせます。
2. 肩ベルト(黄色)を接続します。(カチッと音が鳴るように)
3. 肩ベルト長さは、前もって担ぐ人の身長差に合わせて担架がウエスト位置になるように調整しておいてください。(ウエストの位置が軽く担げる位置です。また移動が楽になります)
4. 通常はイラスト図のように2人で担ぎます。浴槽の構造や体重の重い人を運ぶ場合は、状況に応じて人数を追加して頭側や足側の持ち手ベルトを持って、安全に移動してください。

担ぎ手人数 1~3人



ベルカに人を乗せる位置

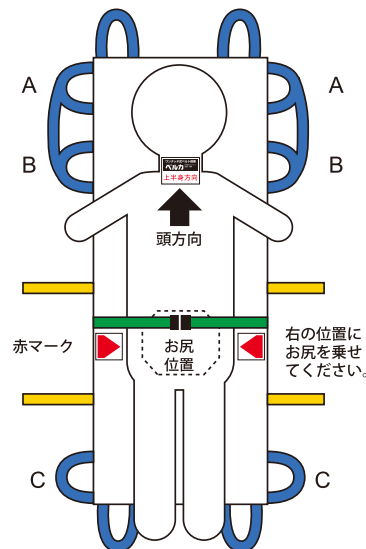

仕様

サイズ	長さ145cm(±2cm) 横幅54cm(±2cm)
重量	2Kg 耐荷重 100Kg
材質	ポリエステル
構造	表地 ポリエステルメッシュ 裏地 ポリエステルメッシュ
加工処理	耐久撥水 80%
フレームベルト	ポリプロピレン

製造元 松岡株式会社

〒595-0025 大阪府泉大津市旭町 4-13