

長い担架サイズ 長さ1600mm 幅650mm

商品番号 KB-160


特長

1. この担架(敷布)は日常生活の起き上がりや、移動動作を助け、又近々起こると予想される大型地震や災害発生時には救急担架としての機能を備え従来の介護用から救急、介護のトータルサポートが可能な万能担架(敷布)として誕生しました。
2. 介護度の高い方に、敷布(担架)の持ち手を使うと、要介護の方、介助される方、共に楽に寝起きの動作ができ、又体位を変えられる時や身体移動時には、担架として使用できます。
3. 担架使用時、切断による、落下防止のために、強度のツイル織布の2重構造です。
 - 3-1 常敷布団の上に敷いて使用していただきますと、上記の動作が行なえます。
 - 3-2 肩で担ぐため、緊急時等では1人でも移動可能な構造になっています、通常は2人~3人で、搬送できます。

使用時注意点

1. 2人~3人で担ぐ時は、身長の高い人に合わせてベルト調整してください又搬送者のお尻位置は ▶ ◀ 置に来るようにしてください。(担いだ時担架位置は骨盤位置前後が楽に担げます)
 - 1-1 移動時接続ソケットに差し込む場合、カチット音がするように完全に差し込んでください。
 - 1-2 洗濯する場合、本体担架を洗濯ネットに入れて使用ください。
 - 1-3 付属の緑ベルト(安全ベルト)で、脇の下と骨盤位置2箇所を搬送者を固定してください。
 - 1-4 担架は人身以外の使用はしないでください。
 - 1-5 起こしてあげた時に、別売りの背もたれ座椅子を使用していただけると、リクライニングベッドとしての仕様ができます。(尿もれシート、キルト地も別売りで有ります)

通常使用の場合
左右から2人でベルトを
使って担ぐことができます。

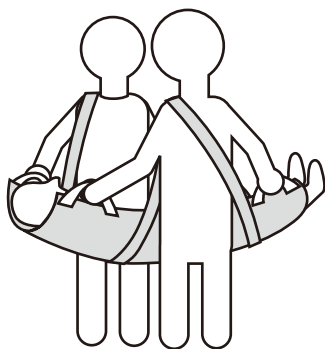

仕様

サイズ	長さ160cm×横幅 65cm(± 2cm) ^{※1}
重量	1.5 kg 耐荷重 100kg
材質	担架本体 綿100%
	フレームベルト ポリプロピレン
外袋	ビニール袋(洗濯可)

※1 縫製行程において2cm前後の誤差が生じる場合があります。

※2 製品の仕様・デザイン及び各種情報は改良のため予告なく変更する事が有ります。

起こす時



1 ベッドや布団の上に敷く。
お尻の位置が、赤マークの中央に
来るように寝る。

2 左右から取手を握り
ゆっくり起こす。

3 起こした後、背もたれ
(座いす)を引き寄せて
当てると姿勢が安定します。