

短い担架サイズ 長さ900mm 幅650mm

商品番号 KB-90

## 特長

1. 介護度の低い方が介助を得て、階段、傾斜面や、車椅子から、目的場所への移動が楽に行なえます。
2. 担架布部材は搬送時、切断による落下防止のために、強度のツイル織布の2重構造です。
  - 2-1 携帯が楽なコンパクトサイズなので、必要な時、必要な場所での使用が簡単に出来ます。  
(災害発生時、避難移動等緊急時特に役立ちます)
  - 2-1 肩で担げるため、介助者は2人で、搬送できます。
  - 2-3 ワンタッチで担架となりますので、組み立ての必要がありません。

## 使用時注意点

1. 2人で担ぎますので身長差がある場合、身長の低い方に合わせると軽く楽に移動できます。又搬送者のお尻を担架の▶ ◀ 置に座らせて下さい。  
(担いだ時の担架位置は骨盤位置前後が楽に担げます)
2. 接続ソケットに差し込む場合、カチット音がするように、完全に差し込んでください。
3. 洗濯する場合、本体担架を洗濯ネットに入れて使用下さい。
4. 担架は人身以外の使用はしないで下さい。
5. 付属の緑色ベルト(安全ベルト)で搬送者を固定して下さい。

## 通常使用の場合

左右から2人でベルトを使って担ぐことが出来ます。




## 仕様

サイズ	長さ 90cm(±2cm)	横幅65cm(±2cm)
重量	1.1Kg	耐荷重 100Kg
素材	綿 100%	フレームベルト ポリプロピレン
外袋	ナイロン(洗濯可)	


※1 縫製行程において2cm前後の誤差が生じる場合があります。

※2 製品の仕様・デザイン及び各種情報は改良のため予告なく変更する事があります。

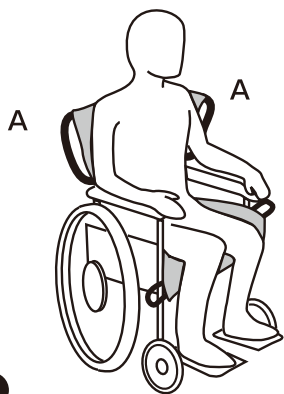

①

車いすに乗る時、座面に敷く。  
お尻の位置が、赤マークの中央に  
来るように座る

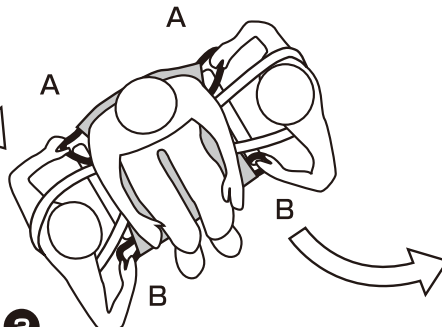

②

左右から2人でAとBの取手を握り  
肩ベルトを背中に回して掛ける。



③

人とベルカごと理容イス  
などの移動先に運ぶ。