

救護用

ベルカ

商品番号
SB-90A

日本縫製


担ぎ手人数 **2人**

90cmタイプ 緊急時、災害発生時に交通弱者〔車椅子利用者、歩行に時間が掛かる〕方の移動の手助けに最適です。



2人担ぎ


左右からベルトを肩に掛けて、両手で頭と足のベルトを握りゆっくりと持ち上げて下さい。移動は矢印方向へ、担ぎ手が上体を向けて歩いて下さい。

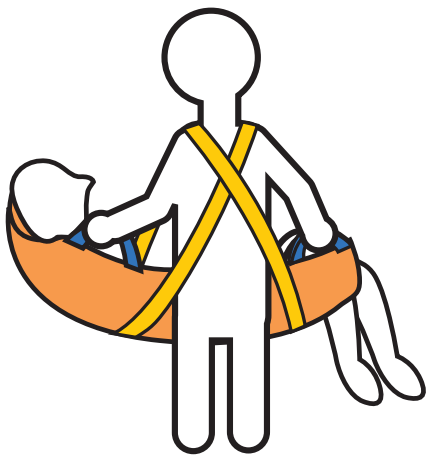

1人担ぎ

2本のベルトを背中で交差させ、頭と足の左右のベルト2本を握りゆっくりと持ち上げて下さい。

ベルカに人を乗せる位置

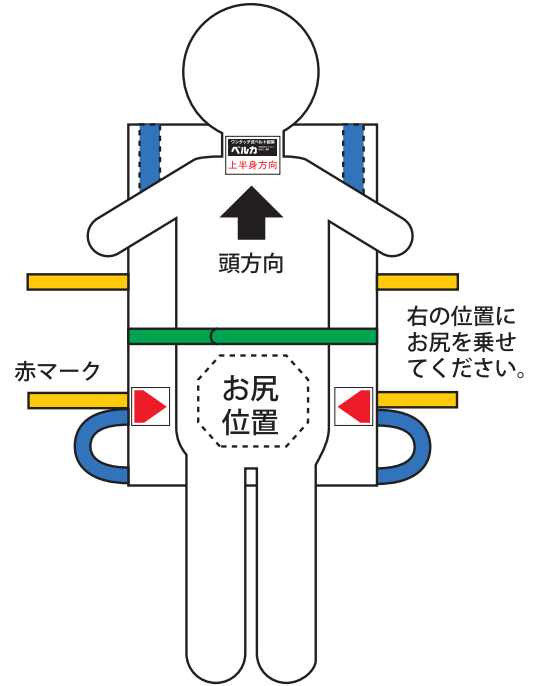

使用手順

1. 肩ベルトの長さは、担ぐ人の中で身長の高い人に合わせて調整してください。
2. 担架裏面のゴム紐を椅子に引っ掛けて、そこに座るようにしてください。
3. 搬送者を赤▼マークの位置に座らせて、安全ベルトで固定してください。
4. 防水、防炎布を使用しているため、汚れは中性洗剤で拭き取ってください。
5. 本体タンカは安全重視で3層構造の縫製をしてありますが、身体移動以外には使用を避けてください。

仕様

サイズ	長さ 90cm(±2cm) 横幅52cm(±2cm)
重量	1.0Kg 耐荷重 100Kg
材質	ターポリン ナイロン
構造	表地 ナイロン(撥水布) 裏地 ターポリン(防炎・防水布)
フレームベルト	ポリプロピレン

製造元 **松岡株式会社**

〒595-0025 大阪府泉大津市旭町 4-13